


BIJSLUITER

Bedankt dat je voor onze test hebt gekozen!

Voor een betrouwbaar testresultaat is het belangrijk dat je de instructies zorgvuldig opvolgt. Lees deze bijsluiter goed door voor je start met de test. Zo weet je precies wat je te wachten staat.

Inhoud van de verpakking:

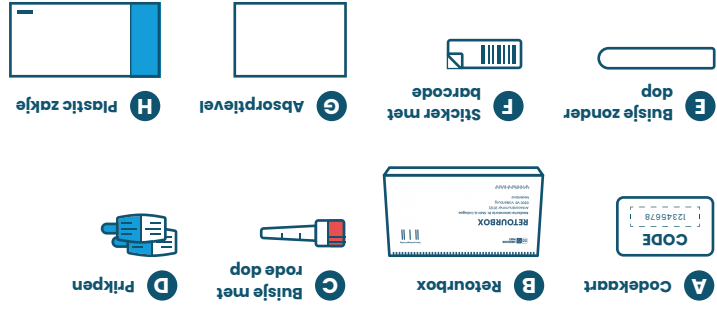

Instructies testafname




Haal de codekaart (A) uit de retourdoos en bewaar hem goed. Deze heb je later nodig om je uitslag op te vragen.


Zonder code krijg je geen uitslag!



Was je handen met warm water en droog ze goed af. Zet de retourbox (B) op een vlakke ondergrond. Haal de rode dop van het buisje (C) en zet vervolgens het buisje in de retourbox zodat deze rechtop staat.

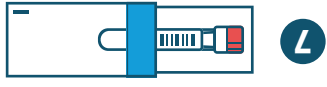

Was je handen met warm water en zeep. Kies een vinger: bij voorkeur de ring- of middelvinger van je niet-dominante hand. Verwarm die hand vervolgens aan een warm glas water.

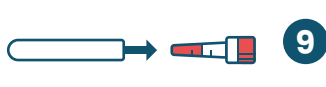


Als er genoeg bloed in het buisje zit, plaats je de dop weer op het buisje. Druk de dop stevig aan tot je een klik hoort. Neem vervolgens het andere buisje (E) en plaats deze om het buisje met de rode dop.



Druk de prikpen stevig op de prikplek. Houd na de prik je hand naar beneden en masseer je vinger vanaf de handpalm, zodat er druppels bloed ontstaan. Vul het buisje tot tussen de twee lijnen.



Plak de retourbox dicht met de plakstrip aan de zijkant en doe deze in een PostNL briefvenbus. Je kunt je uitslag opvragen na 24-36 uur vanaf het moment dat jouw sample in ons lab is aangekomen.

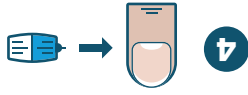

Masseer de gekozen vingertop een paar seconden voor je gaat prikken. De beste plek om te prikken is de zijkant van je vingertop. Draai vervolgens de dop van de prikpen (D).



! Test je voor een soa? Test nooit binnen de windwase. Voor hiv is dit 90 dagen en voor syfilis 21 dagen.

