

BIJSLUITER

Bedankt dat je voor onze soa-test hebt gekozen! Om je een betrouwbaar testresultaat te garanderen is het belangrijk dat je de instructies zorgvuldig opvolgt. Lees dus voor gebruik deze bijsluiter goed door, dan weet je precies wat je te wachten staat.

Instructies testafname

Haal de codekaart (A) uit de retourdoos en bewaar deze goed. De code die erop staat heb je later nodig om je uitslag op te vragen. **Zonder code krijg je geen uitslag!**



Doe het wattenstaafje (B) in je mond en strijk langs je gehemelte, en de zijkant en achterkant van je keel. Probeer je mond en wang niet aan te raken.




Doe het plastic zakje in de retourbox (E) en vouw deze dicht. Gebruik de plakstrip om de zijkant om de box gemakkelijk dicht te plakken.



Doe het buisje met het absorptieveel (E) in het plastic zakje (F) en plak deze goed dicht.

Inhoud van de verpakking:

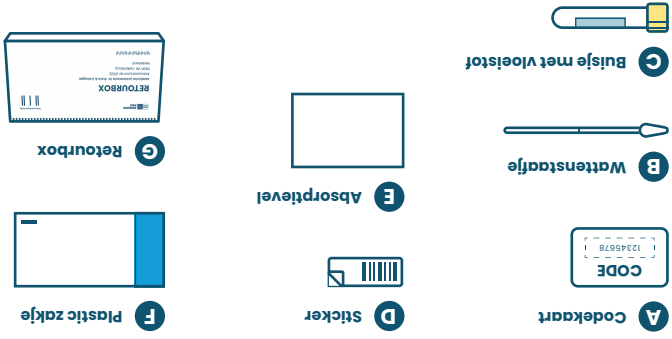

Test pas 14 dagen na je laatste onveilige seksuele contact!



Open het buisje met vloeistof (C). Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn. Draai daarna de dop goed vast en plak de sticker (D) recht op het buisje.



De retourbox doe je in een PostNL-briefbus. Je kunt je uitslag opvragen na 24 tot 36 uur vanaf het moment dat jouw sample in ons lab is aangekomen.