


# BIJSLUITER

**Bedankt dat je voor onze soa-test hebt gekozen!** Om je een betrouwbaar testresultaat te garanderen is het belangrijk dat je de instructies zorgvuldig opvolgt. Lees dus voor gebruik deze bijsluiter goed door, dan weet je precies wat je te wachten staat.


## Instructies testafname



Haal de codekaart (A) uit de retourdoos en bewaar deze goed. De code die erop staat heb je later nodig om je uitslag op te vragen. **Zonder code krijg je geen uitslag!**

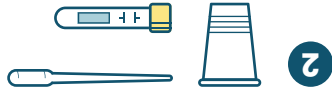

Zorg dat je **minimaal 1 uur** niet hebt geplast. Pak een schoon (wegwerp)bekertje en vang hiermee de eerste straal van je urine op. Gebruik het pipetje (B) om de urine in het buisje (C) te brengen.

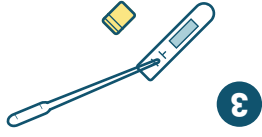

De urine moet tussen de twee zwarte lijntjes op het buisje komen. Draai daarna de dop weer goed vast. Draai het buisje 5 keer om zodat de vloeistof mengt.



Plek de sticker (D) recht op het buisje en doe deze met het absorptieveel (E) in het plastic zakje (F). Plak het zakje goed dicht.




Doe het plastic zakje in de retourbox (G) en vouw deze dicht. Gebruik de plakstrip aan de zijkant om de box gemakkelijk dicht te plakken.



De retourbox doe je in een PostNL-briefbus. Je kunt je uitslag opvragen na 24 tot 36 uur vanaf het moment dat jouw sample in ons lab is aangekomen.

### Inhoud van de verpakking:

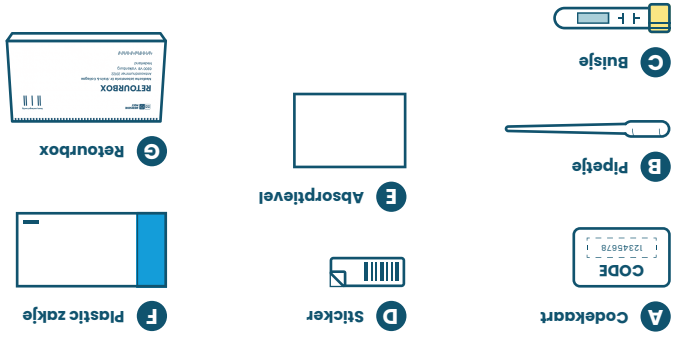

**Test pas 14 dagen na je laatste onveilige seksuele contact!**



**SOA-TEST URINE (penis)**  
Chlamydia en Gonorrhoe