

BIJSLUITER

Bedankt dat je voor onze soa-test hebt gekozen! Om je een betrouwbaar testresultaat te garanderen is het belangrijk dat je de instructies zorgvuldig opvolgt. Lees dus voor gebruik deze bijsluiter goed door, dan weet je precies wat je te wachten staat.

Instructies testafname

1 Haal de codekaart (A) uit de retourdoos en bewaar deze goed. De code die erop staat heb je later nodig om je uitslag op te vragen. **Zonder code krijg je geen uitslag!**



2 Ga zitten of staan op een manier die voor jou comfortabel voelt, vergelijkbaar met wanneer je een tampon inbrengt. Pak het wattenstaafje (B) en breng deze 5 cm in de vagina. Strijk vervolgens 30 seconden met ronddraaiende bewegingen langs de vaginawand.



3 Doe het plastic zakje (E) in het plastic zakje (F) en plak deze goed dicht.



4 Doe het plastic zakje in de retourbox (G) en vouw deze dicht. Gebruik de plakstrip om de zijkant om de box gemakkelijk dicht te plakken.



5 Open het buisje met vloeistof (C). Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn. Draai daarna de dop goed vast en plak de sticker (D) recht op het buisje.



Test pas 14 dagen na je laatste onveilige seksuele contact!

Inhoud van de verpakking:

- A Codekaart
- B Wattenstaafje
- C Buisje met vloeistof
- D Sticker
- E Absorptievel
- F Plastic zakje
- G Retourbox

